



WIDEX SOUND ASSIST


WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



GÖR DET ÄNNU ENKLARE ATT HÖRA LJUD SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG

Widex Sound Assist är som en 'Swiss Army knife' till dina hörapparater som får plats i din hand. Den kan användas som en rundupptagande bordsmikrofon, som en partnernmikrofon för enskilda samtal, hands-free funktion, streama ljud från digitala och analoga källor, och även fungera som en fjärrkontroll till dina hörapparater. Widex Sound Assist erbjuder även telespole, som ger hörapparat användaren fördelen att kunna streama via teleslinga.

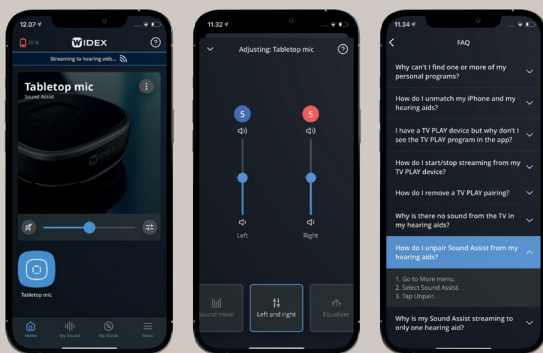

Hjälp tillhandahålls via MOMENT app

Det är enkelt att justera via appen, tex volym och ljudmixer i de olika lägena. Det finns också guider om "Hur du parkopplar", "Hur du startar", samt hjälp via "frågor och svar".

SOUND ASSIST KAN HJÄLPA I OTALIGA SITUATIONER

- **Partnermikrofon**
Enskilda samtal med familj och vänner hörs tydligt var du än befinner dig.
- **Rundupptagande bordsmikrofon**
Enklare att följa med och höra i viktiga möten, livliga middagar och gruppdiskussioner.
- **Hands-free telefonsamtal**
Fantastiskt ljud i samtalen på språng.
- **Streaming från alla Bluetooth-enheter**
Streama musik, film eller TV-ljud till dina hörapparater.
- **Fjärrkontroll till Widex MOMENT Bluetooth hörapparater.**
Enkelt att justera ljudet.
- **Teleslinga**
Möjlighet till teleslinga även om dina hörapparater inte har det.



TEKNISK DATA

- Batterilivslängd: 10 tim (blandad användning)
- Fulladdad : 3 tim
- Li-ion batteri
- Micro USB power supply
- Storlek : 43x43x16 mm
- Vikt: 32g



LÄR KÄNNA DIN SOUND ASSIST

Widex Sound Assist är en 'Swiss Army knife' för dina hörapparater som får plats i din hand. Den kan bli en bordsmikrofon, användas som en partnermikrofon vid enskilda samtal, möjliggöra hands-free telefonsamtal, streaming från digitala och analoga källor samt även fungera som en fjärrkontroll till dina hörapparater. Widex Sound Assist erbjuder även telespole, som ger hörapparat användaren möjlighet att använda teleslinga.



PARKOPPLA SOUND ASSIST MED DINA HÖRAPPARATER

PARKOPPLA TILL DINA HÖRAPPARATER:

Widex Sound Assist måste parkopplas till dina hörapparater innan du parkopplar den med andra enheter som tex smartphone eller dator.

- Försäkra dig om att Widex Sound Assist är avstängd, starta om dina hörapparater. hörapparaterna är i parkopplingsläge i 3 minuter.
- Tryck och håll inne volym +(3) och på/av knappen (6) i 3 sekunder tills det lyser blått (1).
- Hörapparat och Sound Assist måste vara inom 1 meter från varandra.
- Parkopplingen startar automatiskt, och lampan (1) blinkar grönt en kort stund när parkopplingen är klar.

Widex Sound Assist kan endast parkopplas till ett par hörapparater åt gången. För att parkoppla till ett nytt par hörapparater, behöver du genomföra samma steg som ovan.

PARKOPPLING TILL ANDRA ENHETER:

- Tryck och håll inne volym +(3) och på/av knappen (6) i 3 sekunder tills det lyser blått (1).
- Hörapparat och Sound Assist måste vara inom 1 meter från varandra.
- Parkopplingen startar automatiskt, och lampan (1) blinkar grönt en kort stund när parkopplingen är klar.

Widex Sound Assist kan parkopplas med upp till 8 Bluetooth enheter och aktivt var ansluten till 1 Bluetooth enhet.

SNABBGUIDE

För att stänga av och på **Widex Sound Assist** trycker och håller du av/på knappen (6) i 2 sekunder.

Ändra mellan enhetens lägen

- Försäkra dig om att enheten är påslagen.
- Tryck kort på av/på knappen (6) för att ändra mellan enhetens olika lägen.
- Enheten lyser på det läge som är aktivt.



Det aktuella läget visas i de tre ljuslägesindikatorerna (6).

Justera streamingljudet

Tryck kort på volymknappen+ (3) eller volymknappen- (4) för att justera ljudstyrkan.

Så bär du Widex Sound Assist

Använd den integrerade metall-clipet (8) eller den inkluderande halsslinga.

Aktivera knapplås för att undvika oavsiktlig justering

- Tryck på volym+ (3) och programknappen (5) samtidigt för att aktivera och avvaktivera knapplåsfunktionen.
- Indikatorljus för aktivt läge (1) blinkar två gånger för att indikera att knapparna har blivit låsta eller upplåsta.

Laddning

Använd medföljande micro-USB kabel för att ladda din Widex Sound Assist. Full laddning kräver 3 timmars laddning.

EXTERN MIKROFON

Partnermikrofon

- När en partner/vän/talare bär Sound Assist, streamas automatiskt rösten från den personen direkt till hörapparaterna.

Bordsmikrofon

- Gör ett kort knapptryck på, på/av knappen (6) för att välja bordsmikrofonläge (7).
- När mikrofonlägesindikatorn (7) lyser grönt, är bordsmikrofonen aktiv.
- Bäst resultat uppnås när Widex Sound Assist ligger på en plan yta.

Om du vill fokusera på en viss person, kan du låsa mikrofonen i ett fast läge och manuellt rikta mot den du vill lyssna till.

- Tryck och håll tryckknappen (2) tills oandelens indikatorljus (1) har ett fast grönt ljus.
- Rikta Widex Sound Assist till den person du vill ha fokuserad.
- Tryck och håll tryckknappen (2) igen för att låsa upp den fasta lyssningsriktningen.

Stänga av mikrofonljudet

Stäng av hörapparatsens mikrofoner medan du streamar för att stänga ute omgivningsljud.

- Tryck och håll volymknappen- (4) i minst 3 sekunder för att stänga av hörapparatsens mikrofoner.
- Tryck och håll volymknappen + (3) för att slå på hörapparatsens mikrofoner.

BLUETOOTH STREAMING

- Tryck kort på av/på knappen (6) för att välja Bluetooth-läge (Bluetooth ikon) (7).
- När Bluetooth-ikonen (7) är grön, är Bluetooth-läget aktivt.

Hands-free telefonsamtal

Svara eller avvisa dina telefonsamtal genom att använda Widex Sound Assist, streama samtal från alla smartphones till dina hörapparater.

INKOMMANDE SAMTAL

Svara	Tryck kort på tryck-knappen (2) för att svara på ett samtal.
Avsluta	Tryck kort på tryck-knappen (2).
Avvisa	Tryck och håll tryck-knappen (2) i ca 2 sekunder.

UTGÅENDE SAMTAL

Ring upp	Starta samtalet manuellt på den parkopplade telefonen eller använd telefonens röststyrning. När samtalet är igång hörs din röst via Widex Sound Assist's mikrofoner
-----------------	---

Användning av röststyrning

- Försäkra dig om att Widex Sound Assist är parkopplad till en Bluetooth enhet med röststyrningen aktiverad.
- Tryck och håll tryck-knappen (2) i 2 sekunder och gör ditt röstkommando.

Ljudstreaming

Streama ljud från vilken Bluetooth enhet som helst till dina hörapparater. Välj Widex Sound Assist från Bluetooth menyn i din enhet alternativt sätt båda enheterna i parkopplingsläge för att tillåta parkoppling.

Starta/pausa	Tryck kort på tryck-knappen (2)
Nästa	Dubbeltryck på tryck-knappen (2).
Avsluta	Tryck på tryck-knappen (2) tre gånger

Fjärrkontroll

När Sound Assist inte används för streaming kan den användas som en fjärrkontroll till dina hörapparater, ändra program och volym.

För att aktivera fjärrkontrollen väljer du Bluetooth-läge.

Byta Program

Tryck kort på programknappen (5) för att byta program på dina hörapparater. Om dina hörapparater är programmerade med Zen+ program, får du tillgång till dem genom en lång tryckning på programknappen (5). Tryck sedan kort på programknappen (5) för att få tillgång till att välja mellan de valbara zen-stilarna.

Justera ljudstyrkan

Tryck kort på volym öka knappen (3) för att öka volymen och tryck kort på volym sänka knappen (4) för att sänka volymen.



STREAMING VIA TELESLINGA

Widex Sound Assist kan streama från teleslinga när den befinner sig i telespoleläge.

- Tryck kort på av/på knappen (6) för att välja T-läge ikonen.
- När T ikonen (7) är grön, är telespoleläget aktiverat.
- För att starta och stoppa streaming från telespole trycker du kort på tryck-knappen (2).

The logo for WIDEX, featuring the word "WIDEX" in a bold, sans-serif font. The letter "W" is enclosed within a rounded rectangular shape.

SOUND LIKE NO OTHER



Widex is a registered trademark of WIDEX A/S.
Printed by Rosendahls a/s. 2022-11.
90065-1-W-SE-1222 Widex Moment Sheer Sound Assist M65

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc.

Android, Google Play and Google Play logo are trademarks
of Google Inc.

Subject to change with no further notice.

A button with a white Apple logo on the left and the text "Download on the App Store" in white on a dark background.A button with the Google Play logo (a colorful triangle) on the left and the text "GET IT ON Google Play" in white on a dark background.